

# Πομπός CROS Pure

Οδηγός Χρήστη



Hearing  
Systems

**SIEMENS**

# Περιεχόμενα

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Καλώς ήρθατε</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Ο πομπός σας CROS</b>                  | <b>5</b>  |
| Εξαρτήματα και ονομασίες                  | 7         |
| Στοιχεία ελέγχου                          | 9         |
| Ηχητικά σήματα                            | 9         |
| <b>Μπαταρίες</b>                          | <b>10</b> |
| Μέγεθος μπαταρίας και συμβουλές χειρισμού | 10        |
| Αντικατάσταση μπαταριών                   | 11        |
| <b>Καθημερινή χρήση</b>                   | <b>12</b> |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση           | 12        |
| Τοποθέτηση και αφαίρεση του πομπού        | 12        |
| Ρύθμιση έντασης ήχου                      | 16        |
| <b>Ειδικές ακουστικές συνθήκες</b>        | <b>17</b> |
| Τηλεφωνική συνομιλία                      | 17        |
| <b>Συντήρηση και φροντίδα</b>             | <b>18</b> |
| Συσκευή                                   | 18        |
| Εξαρτήματα για το αυτί                    | 20        |
| Επαγγελματική συντήρηση                   | 22        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Περισσότερες πληροφορίες</b>         | <b>23</b> |
| Επεξήγηση συμβόλων                      | 23        |
| Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης      | 24        |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων                | 24        |
| Πληροφορίες απόρριψης                   | 25        |
| Πληροφορίες συμμόρφωσης                 | 25        |
| Πληροφορίες ειδικές για κάθε χώρα       | 28        |
| <b>Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας</b> | <b>29</b> |
| Προσωπική ασφάλεια                      | 29        |
| Ασφάλεια προϊόντος                      | 33        |
| Συντήρηση και εγγύηση                   | 35        |

# Καλώς ήρθατε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα εξαρτήματα ακουστικών που διαθέτουμε.

Αυτός ο οδηγός, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του ειδικού σε θέματα ακοής, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα οφέλη και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής που σας προσφέρει αυτό το εξάρτημα.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό χρήστη προσεκτικά και στο σύνολό του.

Ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφάλειας για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών ή τραυματισμών.


# Ο πομπός σας CROS

Τα προϊόντα CROS έχουν σχεδιαστεί για άτομα με πολύ σοβαρή απώλεια ακοής στο ένα αυτί, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ακουστικού.

Ο πομπός CROS τοποθετείται σε αυτό το αυτί, λαμβάνει τον ήχο από αυτήν την πλευρά και τον μεταδίδει στο ακουστικό στο άλλο αυτί. Αυτό επιτρέπει στο άτομο που φοράει το ακουστικό να ακούει ήχους και από τις δύο πλευρές.

Πομπός CROS

ακουστικό

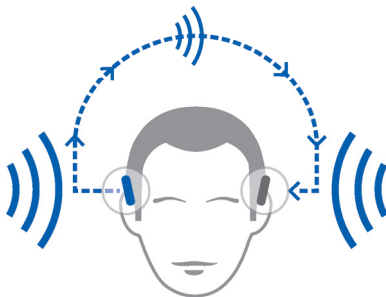

Διατίθενται δύο εκδόσεις:

- Έκδοση CROS:

Για άτομα με φυσιολογική ακοή στο ένα αυτί και πολύ σοβαρή απώλεια ακοής στο άλλο αυτί. Οι ήχοι από την πλευρά με την απώλεια ακοής λαμβάνονται και μεταδίδονται ασύρματα στην πλευρά με την καλή ακοή.

- Έκδοση BiCROS:

Για άτομα με πολύ σοβαρή απώλεια ακοής στο ένα αυτί και λιγότερο σοβαρή απώλεια ακοής στο άλλο αυτί. Οι ήχοι από την πλευρά με την πιο σοβαρή απώλεια ακοής λαμβάνονται και μεταδίδονται ασύρματα στην πλευρά με την καλύτερη ακοή. Το ακουστικό επεξεργάζεται και ενισχύει τους ήχους και από τις δύο πλευρές.

Ο πομπός CROS λειτουργεί σε συνδυασμό με τα ειδικά ασύρματα ακουστικά της εταιρείας μας. Ο ειδικός σε θέματα ακοής θα σας ενημερώσει σχετικά με τα συμβατά μοντέλα.



#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ο παρών οδηγός χρήστη ισχύει μόνο για τον πομπό CROS. Το ακουστικό σας διαθέτει ξεχωριστό οδηγό χρήστη.

## Εξαρτήματα και ονομασίες



- 
- |                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ❶ Εξάρτημα για το αυτί         | ❹ Θήκη μπαταρίας<br>(διακόπτης ενεργοποίησης/<br>απενεργοποίησης)   |
| ❷ Διάταξη συγκράτησης<br>δέκτη | ❺ Ένδειξη πλευράς<br>(κόκκινο = δεξί αυτί,<br>μπλε = αριστερό αυτί) |
| ❸ Καλώδιο δέκτη                | ❻ Σύνδεση δέκτη                                                     |
| ❹ Οπές μικροφώνου              |                                                                     |
| ❺ Διακόπτης τύπου rocker       |                                                                     |
- 

Το εξάρτημα για το αυτί, η διάταξη συγκράτησης δέκτη και το καλώδιο δέκτη χρησιμοποιούνται μόνο για τη συγκράτηση της συσκευής στο αυτί. Δεν αναπαράγεται ήχος.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τυπικά ή κατά παραγγελία εξαρτήματα για το αυτί.

| Τυπικά εξαρτήματα για το αυτί |                                                                                   | Μέγεθος                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="radio"/>         |  | Click Dome™ μονό<br>(ανοικτό ή κλειστό) |
| <input type="radio"/>         |  | Click Dome ημι-κλειστό                  |
| <input type="radio"/>         |  | Click Dome διπλό                        |


Η αντικατάσταση των τυπικών εξαρτημάτων για το αυτί είναι εύκολη. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα "Συντήρηση και φροντίδα".

| Κατά παραγγελία εξαρτήματα για το αυτί |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>                  |  Προσαρμοσμένο κέλυφος |
| <input type="radio"/>                  |  Click Mold™          |



## Στοιχεία ελέγχου

Με το διακόπτη τύπου rocker, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

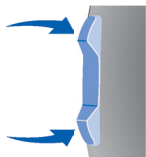

## Ηχητικά σήματα

Τα ηχητικά σήματα του πομπού CROS –όπως η ειδοποίηση (μπιπ) χαμηλής στάθμης μπαταρίας– αποστέλλονται στο ακουστικό.

Απευθυνθείτε στον ειδικό σε θέματα ακοής για τη διαμόρφωση των ηχητικών σημάτων.

# Μπαταρίες

Όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, ο ήχος εξασθενεί ή εκπέμπεται ένα προειδοποιητικό σήμα. Ο τύπος της μπαταρίας προσδιορίζει το χρονικό περιθώριο που έχετε για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

## Μέγεθος μπαταρίας και συμβουλές χειρισμού

Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής για συνιστώμενες μπαταρίες.

---

Μέγεθος μπαταρίας:

312

---

- Το σήμα "χαμηλή στάθμη μπαταρίας" του πομπού CROS και το σήμα "χαμηλή στάθμη μπαταρίας" του ακουστικού έχουν διαφορετικές μελωδίες.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό μέγεθος μπαταριών για τη συσκευή σας.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετές ημέρες, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Έχετε πάντα διαθέσιμες εφεδρικές μπαταρίες.
- Αφαιρέστε αμέσως τις άδειες μπαταρίες και ακολουθήστε τους εκάστοτε τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης που ισχύουν για την απόρριψη μπαταριών.

## Αντικατάσταση μπαταριών

Αφαίρεση της μπαταρίας:

- ▶ Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας.



- ▶ Χρησιμοποιήστε τη μαγνητική ράβδο για να τραβήξετε προς τα έξω την μπαταρία. Η μαγνητική ράβδος διατίθεται ως αξεσουάρ.



Τοποθέτηση της μπαταρίας:

- ▶ Εάν η μπαταρία έχει κάποια προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέστε τη μόνο όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε την μπαταρία με το σύμβολο "+" στραμμένο προς τα επάνω (ανατρέξτε στην εικόνα).



- ▶ Κλείστε προσεκτικά τη θήκη της μπαταρίας. Εάν συναντήσετε αντίσταση, η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Μην επιχειρήσετε να κλείσετε τη θήκη της μπαταρίας ασκώντας δύναμη. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.

# Καθημερινή χρήση

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- ▶ Ενεργοποίηση: Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.  
Ο πομπός ενεργοποιείται με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων (**καθυστέρηση ενεργοποίησης**).
- ▶ Απενεργοποίηση: Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας.

## Τοποθέτηση και αφαίρεση του πομπού

Η κάθε πλευρά υποδεικνύεται από έγχρωμα σημάδια:

- κόκκινο σημάδι = δεξι αυτί
- μπλε σημάδι = αριστερό αυτί




### Τοποθέτηση:

- ▶ Κρατήστε το καλώδιο δέκτη στο τμήμα κάμψης που είναι πιο κοντά στο εξάρτημα για το αυτί.
- ▶ Ωθήστε προσεκτικά το εξάρτημα για το αυτί μέσα στο κανάλι του αυτιού **1**.
- ▶ Περιστρέψτε το ελαφρώς για να εφαρμόσει καλά.

Ανοίξτε και κλείστε το στόμα σας, για να αποφευχθεί η συσσώρευση αέρα στο κανάλι του αυτιού.

- ▶ Ανασηκώστε τη συσκευή και σύρετέ την πάνω από το αυτί σας **2**.

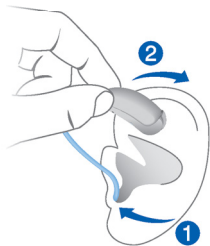

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

- ▶ Τοποθετήστε προσεκτικά το ηχείο στο αυτί και όχι σε μεγάλο βάθος.

**i**

- Συνιστάται η εισαγωγή της **δεξιάς** συσκευής με το **δεξί** χέρι και της **αριστερής** συσκευής με το **αριστερό** χέρι.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εισαγωγή του εξαρτήματος για το αυτί, χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει το κανάλι του αυτιού και διευκολύνεται η εισαγωγή του εξαρτήματος για το αυτί.


Το προαιρετικό έμβολο συγκράτησης βοηθά στην ασφαλή συγκράτηση του εξαρτήματος για το αυτί μέσα στο αυτί σας. Για να τοποθετήσετε το έμβολο συγκράτησης:

- Κάμψτε το έμβολο συγκράτησης και τοποθετήστε το προσεκτικά στο κάτω μέρος του πτερυγίου του αυτιού σας (ανατρέξτε στην εικόνα).



Αφαίρεση:

- ▶ Ανασηκώστε τη συσκευή και σύρετέ τη πάνω από το αυτί σας **1**.
- ▶ Εάν η συσκευή σας διαθέτει προσαρμοσμένο κέλυφος ή Click Mold, αφαιρέστε το τραβώντας το μικρό κορδόνι αφαίρεσης προς το πίσω μέρος του κεφαλιού σας.
- ▶ Για όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα για το αυτί: Πιάστε το δέκτη στο κανάλι του αυτιού με δύο δάκτυλα και τραβήξτε τον προσεκτικά προς τα έξω **2**.

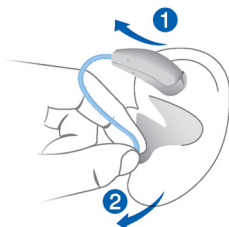

Μην τραβάτε το καλώδιο δέκτη.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κίνδυνος τραυματισμού!

- ▶ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το εξάρτημα για το αυτί μπορεί να παραμείνει στο αυτί σας κατά την αφαίρεση της συσκευής. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, απευθυνθείτε σε ιατρό για να αφαιρέσει το εξάρτημα για το αυτί.

Καθαρίζετε και στεγνώνετε τη συσκευή σας μετά τη χρήση. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα "Συντήρηση και φροντίδα".

## **Ρύθμιση έντασης ήχου**

- Πατήστε στιγμιαία το διακόπτη τύπου rocker του πομπού.

Η ένταση ήχου του πομπού και του ακουστικού ρυθμίζονται ταυτόχρονα.

Προαιρετικά, όταν φτάνετε το προεπιλεγμένο, το μέγιστο ή το ελάχιστο όριο έντασης ήχου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα σχετικό ηχητικό σήμα. Απευθυνθείτε στον ειδικό σε θέματα ακοής για τη διαμόρφωση των ηχητικών σημάτων.



# Ειδικές ακουστικές συνθήκες

## Τηλεφωνική συνομιλία

Ο πομπός CROS σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την πλευρά με την πιο σοβαρή απώλεια ακοής: Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα πρέπει να κρατάτε το δέκτη του τηλεφώνου ελαφρώς πάνω από το αυτί με τον πομπό CROS. Ο πομπός CROS και ο δέκτης του τηλεφώνου πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι.



# Συντήρηση και φροντίδα

Για να αποφευχθεί η πρόκληση βλαβών, είναι σημαντικό να φροντίζετε τη συσκευή σας και να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες, οι οποίοι σύντομα θα ενσωματωθούν στην καθημερινή σας ρουτίνα.

## Συσκευή

### Στέγνωμα και αποθήκευση

- ▶ Στεγνώνετε τη συσκευή σας τη νύχτα.
- ▶ Για τα συνιστώμενα προϊόντα στεγνώματος, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής.
- ▶ Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μη χρήσης, αποθηκεύετε τη συσκευή σας με τη θήκη μπαταριών ανοικτή και χωρίς την μπαταρία σε ένα σύστημα αφύγρανσης, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες της υγρασίας.

## Καθαρισμός

Η συσκευή σας διαθέτει προστατευτική επίστρωση. Ωστόσο, εάν δεν την καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή να τραυματιστείτε.

- ▶ Καθαρίζετε τη συσκευή σας καθημερινά με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τρεχούμενο νερό και μην εμβυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- ▶ Μην ασκείτε πότε πίεση κατά τον καθαρισμό.
- ▶ Για συνιστώμενα προϊόντα καθαρισμού, ειδικά σετ φροντίδας ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση της συσκευής σας σε καλή κατάσταση, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής.



## Εξαρτήματα για το αυτί


### Καθαρισμός

Ενδέχεται να συσσωρευτεί κυψελίδα (κερί των αυτιών) στα εξαρτήματα για το αυτί. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα για το αυτί σε καθημερινή βάση.

Για όλους τους τύπους εξαρτημάτων για το αυτί:

- Αμέσως αφού το αφαιρέσετε, καθαρίστε το εξάρτημα για το αυτί με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ξήρανση και η σκλήρυνση της κυψελίδας.

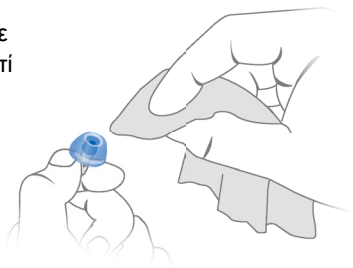

Για το Click Domes:

- Πιέστε το άκρο του θόλου.




### Αντικατάσταση

Αντικαθιστάτε τα τυπικά εξαρτήματα για το αυτί περίπου κάθε τρεις μήνες. Εάν παρατηρήσετε ρωγμές ή άλλες αλλαγές, αντικαταστήστε τα νωρίτερα. Η διαδικασία για την αντικατάσταση των τυπικών εξαρτημάτων για το αυτί

εξαρτάται από τον τύπο του εξαρτήματος. Στην ενότητα "Εξαρτήματα και ονομασίες", ο ειδικός σε θέματα ακοής έχει επισημάνει τον τύπο του εξαρτήματος που διαθέτετε.

### Αντικατάσταση Click Domes

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αφαίρεση του παλιού Click Dome, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αφαίρεσης ή ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του Click Domes:

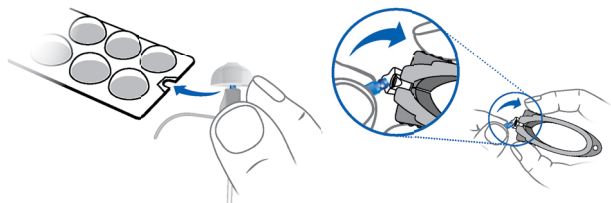

Το εργαλείο αφαίρεσης διατίθεται ως αξεσουάρ.

- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το νέο Click Dome να ασφαλίσει καλά στη θέση του.



## **Επαγγελματική συντήρηση**

Ο ειδικός σε θέματα ακοής μπορεί να εκτελέσει σχολαστικές επαγγελματικές εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Τα κατά παραγγελία εξαρτήματα για το αυτί και τα φίλτρα κεριού πρέπει να αντικαθίστανται από κάποιον επαγγελματία.

Για εξατομικευμένα συνιστώμενα διαστήματα συντήρησης και για υποστήριξη, απευθυνθείτε στον ειδικό σε θέματα ακοής.

# Περισσότερες πληροφορίες

## Επεξήγηση συμβόλων

### Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο

---

 Υποδεικνύει μια κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό, μέτριο ή ελαφρύ τραυματισμό.

 Υποδεικνύει πιθανές υλικές ζημιές.

 Συμβουλές και υποδείξεις για τη βέλτιστη χρήση της συσκευής σας.

---

### Σύμβολα στη συσκευή ή τη συσκευασία

---



Ετικέτα συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές CE, επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με ορισμένες ευρωπαϊκές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες συμμόρφωσης".



Ετικέτα συμμόρφωσης ΗΜΣ και ραδιοεπικοινωνιών Αυστραλίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες συμμόρφωσης".



Υποδεικνύει τον νόμιμο κατασκευαστή της συσκευής.



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα "Πληροφορίες απόρριψης".



Διαβάστε και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στον οδηγό χρήστη.

---

## Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης

Για τα μεγάλα διαστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης, τηρείτε τις παρακάτω συνθήκες:

|                 | <b>Αποθήκευση</b>               | <b>Μεταφορά</b>                  |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Θερμοκρασία     | 10 έως 40 °C<br>(50 έως 104 °F) | -20 έως 60 °C<br>(-4 έως 140 °F) |
| Σχετική υγρασία | 10 έως 80 %                     | 5 έως 90 %                       |

Για άλλα μέρη, όπως μπαταρίες, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές συνθήκες.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Πρόβλημα και πιθανές λύσεις

Το ακουστικό εκπέμπει χαρακτηριστικούς ήχους.

- Αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία του πομπού.  
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα  
"Χαρακτηριστικοί ήχοι".

Ο πομπός δεν λειτουργεί.

- Ενεργοποιήστε τον πομπό.
- Κλείστε προσεκτικά και εντελώς τη θήκη της μπαταρίας.
- Αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Η λειτουργία καθυστέρησης ενεργοποίησης είναι ενεργή. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και ελέγξτε ξανά.

Εάν αντιμετωπίσετε περαιτέρω προβλήματα, επικοινωνήστε με έναν ειδικό σε θέματα ακοής.



## Πληροφορίες απόρριψης

- ▶ Ανακυκλώνετε τα ακουστικά, τα παρελκόμενα και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ▶ Για την αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος, μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.
- ▶ Ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή επιστρέφετέ τις σε ειδικό σε θέματα ακοής.

## Πληροφορίες συμμόρφωσης

Η σήμανση CE υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εξής ευρωπαϊκές οδηγίες: 93/42/ΕΟΚ σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 99/5/ΕΚ (R&TTE) σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, και 2011/65/ΕΟΚ (RoHS) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών.

## Τεχνικά στοιχεία

---

Συχνότητα λειτουργίας:  $f_c = 3,28 \text{ MHz}$

---

Αναγνωριστικό FCC **Η.Π.Α.**: SGI-WL003BTE

---

IC **Καναδά**: 267AB-WL003BTE

---

Ασύρματη πλατφόρμα, μοντέλο: e2e 3.0

---

Η σήμανση συμμόρφωσης ACMA  υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που ορίζονται από την Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης της Αυστραλίας (ACMA: Australian Communications and Media Authority).

Οι συσκευές με το σήμα FCC συμμορφώνονται με τα πρότυπα της FCC σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το πρότυπο ICES-003 του Καναδά.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το νόμιμο κατασκευαστή, ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC) για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC και με το βιομηχανικό πρότυπο RSS-210 του Καναδά.

Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής συνθήκες:

- αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
- αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε είδους παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο παρών εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC),

Ενότητα 15. Με αυτά τα όρια παρέχεται επαρκής προστασία κατά των επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν πρόκειται να παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτείνεται στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια πρίζα που ανήκει σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Αναζήτηση συμβουλής από το κατάστημα αγοράς ή από έμπειρο τεχνικό συσκευών ραδιοφώνου/ τηλεόρασης.

## Πληροφορίες ειδικές για κάθε χώρα

# Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

## Προσωπική ασφάλεια

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών ή άτομα σε ανάπτυξη κάτω των 3 ετών.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

- ▶ Φοράτε πάντα το καλώδιο δέκτη με το ηχείο.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει εφαρμόσει πλήρως.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος επίδρασης σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό!

- ▶ Ελέγξτε αν πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας σε μέρη όπου υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών ή ασύρματων συσκευών.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές με εμφανή βλάβη και επιστρέψτε τις στο σημείο πώλησης.



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Έχετε υπόψη ότι τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο προϊόν μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα. Για υποστήριξη, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής.



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Κίνδυνος πνιγμού!**

Η συσκευή περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που μπορούν να καταποθούν.

- Φυλάσσετε τα ακουστικά, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενα μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική στέρωση.
- Σε περίπτωση κατάποσης εξαρτημάτων, επικοινωνήστε αμέσως με ιατρό ή με νοσοκομείο.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή σας μπορεί να μειώσει ορισμένους ήχους στο παρασκήνιο, καθώς και σήματα κυκλοφορίας ή προειδοποίησης.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος έκρηξης!

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (π. χ. σε εγκαταστάσεις εξόρυξης).

## Αντενδείξεις



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Συμβουλευτείτε έναν ειδικό σε θέματα ακοής, εάν αντιμετωπίσετε τυχόν ασυνήθιστες παρενέργειες όπως δερματικό ερεθισμό, υπερβολική συγκέντρωση κεριού στο αυτί, ζάλη, αλλαγή στην ακοή ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο ξένο αντικείμενο στο ακουστικό κανάλι.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας ειδικός σε θέματα ακοής πρέπει να συμβουλεύει έναν πιθανό χρήστη ακουστικών να επικοινωνεί με έναν ιατρό που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πριν από τη χρήση των ακουστικών, εάν ο ειδικός σε θέματα ακοής διαπιστώσει ότι για τον πιθανό χρήστη συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- ▶ Ορατή συγγενή δυσπλασία ή δυσπλασία λόγω τραύματος του αυτιού.
- ▶ Ιστορικό ενεργής παροχέτευσης από το αυτί, εντός των προηγούμενων 90 ημερών.
- ▶ Ιστορικό αιφνίδιας ή ταχείας προοδευτικής απώλειας ακοής εντός των προηγούμενων 90 ημερών.
- ▶ Οξεία ή χρόνια ζάλη.
- ▶ Μονόπλευρη απώλεια ακοής, η οποία παρουσιάστηκε αιφνίδια ή εντός των προηγούμενων 90 ημερών.
- ▶ Ακουομετρικό χάσμα αέρινης-οστέινης οδού ίσο ή μεγαλύτερο από 15 dB at 500 Hz, 1.000 Hz και 2.000 Hz.
- ▶ Ορατές ενδείξεις σημαντικής συσσώρευσης κυψελίδας ή ξένου σώματος στο κανάλι του αυτιού.
- ▶ Πόνος ή δυσφορία στο αυτί.



## Ασφάλεια προϊόντος



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρος ή νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH).

Μη χρησιμοποιείτε π.χ. επαναφορτιζόμενες αργύρου-ψευδαργύρου ή ιόντων λιθίου.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προστατεύετε τις συσκευές από την υπερβολική θερμότητα. Μην τις εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη στεγνώνετε τις συσκευές στο φούρνο μικροκυμάτων.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διάφοροι τύποι ισχυρής ακτινοβολίας, π. χ. κατά τη διάρκεια εξετάσεων με ακτίνες X ή εξετάσεων MRI κεφαλής, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις συσκευές.

- Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ή παρόμοιων διαδικασιών.

Η ασθενέστερη ακτινοβολία, π. χ. από ραδιοεξοπλισμό ή συστήματα ασφάλειας αεροδρομίου, δεν προκαλεί ζημιά στις συσκευές.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προστατεύετε τις συσκευές από την υψηλή υγρασία. Μη φοράτε τα ακουστικά στο μπάνιο ή όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα μακιγιάζ, άρωμα, γαλάκτωμα για μετά το ξύρισμα, σπρέι για τα μαλλιά ή αντηλιακό.



Σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματου εξοπλισμού.

- Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συσκευές σας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθούν παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, απομακρυνθείτε από την πηγή των παρεμβολών.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συσκευές συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα. Ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα στην αγορά λειτουργούν χωρίς παρεμβολές, για παράδειγμα κάποιες επαγγελματικές εστίες ενδέχεται να προκαλούν ακουστικές παρεμβολές.

## **Συντήρηση και εγγύηση**

### **Σειριακοί αριθμοί**

Αριστερά:

Δεξιά:

### **Ημερομηνίες συντήρησης**

1:

4:

2:

5:

3:

6:

### **Εγγύηση**

Ημερομηνία αγοράς:

Περίοδος εγγύησης σε μήνες:

### **Ο ειδικός σε θέματα ακοής**



## **Νόμιμος κατασκευαστής**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Γερμανία

Τηλέφωνο +49 9131 308 0

Κατασκευάστηκε από τη Signia GmbH βάσει άδειας χρήσης  
εμπορικού σήματος της Siemens AG.

Document No. 02725-99T01-3D00 EL

Order/Item No. 109 365 16

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 04.2016



**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**