

Pure primax

Kasutusjuhend



Hearing
Systems

SIEMENS

Sisu

Tere tulemast!	4
Teie kuuldeaparaadid	5
Aparaadi tüüp	5
Kuuldeaparaatide tundmaõppimine	5
Osad ja nimetused	6
Juhtelemendid	8
Sätted	11
Patareid	13
Aku suurus ja käsitsemisnõuanded	13
Akude vahetamine	14
Akude laadimine	15
Igapäevane kasutamine	16
Sisse- ja väljalülitamine	16
Kuuldeaparaatide sisestamine ja eemaldamine	18
Helitugevuse reguleerimine	21
Kuulmisprogrammi muutmine	22
Täiendav kohandamine (valikuline)	22
Erilised kuulmisolud	23
Fookuse seadistamine (valikuline)	23
Kasutamine telefoni teel suhtlemisel	25
Heli induktsoonsilmused	27

Hooldus	28
Kuuldeaparaadid	28
Kuularid	29
Professionaalne hooldus	31
Lisateave	32
Traadita funktsionaalsus	32
Tarvikud	32
Selles dokumendis kasutatavad sümbolid	33
Tõrkeotsing	33
Riigipõhine teave	34
Hooldus ja garantii	35

Tere tulemast!

Täname, et valisite oma igapäevasteks saatjateks meie kuuldeaparaadid. Nagu kõige uuega, võtab ka nendega tutvumine veidi aega.

See juhend koos kuulamisspetsialisti toega aitab teil mõista eeliseid ja paremat elukvaliteeti, mida kuuldeaparaadid pakuvad.

Kuuldeaparaatide kõige tõhusamaks ärakasutamiseks on soovitatav kanda neid iga päev kogu päeva jooksul. See aitab teil nendega kohaneda.



ETTEVAATUST

Lugege kindlasti see kasutus-, samuti ohutusjuhend põhjalikult läbi. Kahjustuste või vigastuste vältimiseks järgige ohutusteavet.

Teie kuuldeaparaadid



Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse valikulisi funktsioone, mis võivad teie kuuldeaparaatidel olemas olla või puududa.

Paluge oma kuulamisspetsialistil näidata funktsioone, mis teie kuuldeaparaatidel olemas on.

Aparaadi tüüp

Teie kuuldeaparaatide mudel on RIC (vastuvõtja kanalis). Vastuvõtja asub kõrvakanalis ja on aparaadiga ühendatud vastuvõtja kaabli kaudu. Need aparaadid ei ole mõeldud alla 3-aastastele lastele ega isikutele, kelle arenguline vanus jääb alla 3 aasta.


Kuldeaparaatide tundmaõppimine

On soovitatav, et oma uute kuuldeaparaatidega tutvuksite. Proovige aparaate käes hoides juhtelemente kasutada ja pöörake tähelepanu nende asukohale aparaadil. See muudab teie jaoks kuuldeaparaatide kandmisel juhtelementide tunnetamise ja nende vajutamise lihtsamaks.



Kui teil on raskusi juhtelementide vajutamisega kuuldeaparaatide kandmise ajal, saate küsida oma kuulmisspetsialistilt kaugjuhtimise kohta.

Osad ja nimetused

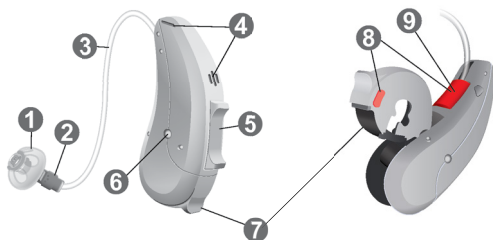

-
- | | |
|--|--|
| 1 Kuular | 6 Laadimiskontaktid (valikuline) |
| 2 Vastuvõtja | 7 Akukamber |
| 3 Vastuvõtja kaabel | 8 Poolenäidik (punane = parem kõrv, sinine = vasak kõrv) |
| 4 Mikrofoni avad | 9 Vastuvõtja ühendus |
| 5 Klahvlüliti (standardne juhtnupp), surunupp või juhtnupp puudub (valikuline) | |
-

Saate kasutada standardseid või kohandatud kuulareid.

Standardised kuularid	Suurus
☐  Ühekordne Click Dome™ (avatud või suletud)	
☐  Poolavatud Click Dome	
☐  Kahekordne Click Dome	


Standardseid kuulareid saab hõlpsasti vahetada.
Lisateavet vt jaotisest Hooldus.

Kohandatud kuularid	
☐  Kohandatud kest	
☐  Click Mold™	

Juhtelemendid

Juhtseadistega saate näiteks helitugevust reguleerida või kuulmisprogramme vahetada. Teie kuuldeaparaatidel on kas surunupp või klahvlüliti või puudub juhtnupp üldse.

Teie kuulmisspetsialist on programminud juhtnuppudele teie soovitud funktsioonid.

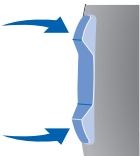Juhtelement		Vasak	Parem
Surunupp		☐	☐
Klahvlüliti		☐	☐
Juhtelement puudub		☐	☐



Saate kasutada ka kaugjuhtimispuhti.

Surunupu funktsioon	L	R
Vajutage lühidalt.		
Programmi muutmine	☐	☐
Helitugevuse suurendamine	☐	☐
Helitugevuse vähendamine	☐	☐
Tinnituse ravisignaali taseme suurendamine	☐	☐
Tinnituse ravisignaali taseme vähendamine	☐	☐
Vajutage pikalt.		
Ooterežiim/sisselülitamine	☐	☐
L = vasak, R = parem		

Klahvlüli funktsioon	L	R
Vajutage lühidalt.		
Programm üles/alla	☐	☐
Helitugevuse suurendamine/vähendamine	☐	☐
Tinnituse ravisignaali taseme suurendamine/vähendamine	☐	☐
Heli tasakaal	☐	☐
Fookuse valik (ruumiline konfiguraator)	☐	☐
Vajutage pikalt.		
Ooterežiim/sisselülitamine	☐	☐
Programm üles/alla	☐	☐
Vajutage väga pikalt.		
Ooterežiim/sisselülitamine	☐	☐

L = vasak, R = parem

Sätted

Kuulmisprogrammid

1

2

3

4

5

6

Lisateavet vt jaotisest „Kuulmisprogrammi muutmine”.

Funktsioonid

- ☐ **Viivitusega käivitus** võimaldab kuuldeaparaate ilma vilinata sisestada.
Lisateavet vt jaotisest „Sisse- ja väljalülitamine”.
- ☐ **AutoPhone™** lülitub automaatselt telefoniprogrammile, kui telefoni vastuvõtja läheneb kõrvale.
Lisateavet vt jaotisest „Kasutamine telefonitsi suhtlusel”.
- ☐ **TwinPhone** edastab telefonikõne mõlemasse kõrva, kui telefoni vastuvõtja on kummagi kõrva juures.
Lisateavet vt jaotisest „Kasutamine telefonitsi suhtlusel”.
- ☐ **Tinnituse ravifunktsioon** loob heli, mis juhib tähelepanu tinnituselt eemale.
- ☐ Kuuldeaparaadi akude laadimiseks **laadimiskontaktidega** asetage aparaat laadijasse. Pärast laadimist vähendab laadija kuuldeaparaatide niiskust.
- ☐ Funktsioon **e2e wireless** võimaldab mõlema kuuldeaparaadi samal ajal juhtimist.
Lisateavet vt jaotisest „Traadita funktsionaalsus”.

Patareid

Kui aku on tühjenemas, muutub heli nõrgemaks või kuulete hoiatussignaali. Aku tüüp määrab, kui pika aja tagant peate akut vahetama või laadima.

Aku suurus ja käsitlemisnõuanded

Küsi ge kuulmisspetsialistilt soovitatavate akude kohta.

Aku suurus:	312
-------------	-----

- Kasutage kuuldeaparaadi korral alati õiges suuruses akusid.
- Kui te ei plaani kuuldeaparaati mitu päeva kasutada, eemaldage sellest akud.
- Kandke varuakusid alati kaasas.
- Eemaldage tühjad akud kohe ja järgige akude lõpphoiustamisel kohalikke utiliseerimisreegleid.

Akude vahetamine

Aku eemaldamine.

- Avage akukamber.



- Kasutage aku väljatõmbamiseks magnetpulka. Magnetpulk on saadaval tarvikuna.



Aku sisestamine.

- Kui akul on kaitsekile, eemaldage see ainult siis, kui akut kasutate.



- Sisestage aku nii, et sümbol + jääks ülespoole (vt pilti).



- Sulgege akukamber ettevaatlikult. Kui tunnete takistust, ei ole aku õigesti sisestatud.

Ärge proovige akukambrit jõuga sulgeda.
See võib kahjustuda.

Akude laadimine

Laadige akusid enne esmakordset kasutamist.

- Akude laadimiseks järgige laadija kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

Pärast mitmeid laadimistsükleid võib aku tööiga lüheneda. Sellisel juhul vahetage akud uute vastu välja. Selleks järgige akude vahetamise juhiseid.

Igapäevane kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Teil on kuuldeaparaatide sisse- või väljalülitamiseks järgmised võimalused.

Akukambri kaudu

- ▶ Sisselülitamine Sulgege akukamber.
Seatakse **vaikimisi määratud** helitugevus ja kuulmisprogramm.
- ▶ Väljalülitamine Avage akukamber esimese tõkkeni.

Laadimisjärgselt

- ▶ Sisselülitamine võtke aparaadid laadijast välja.
Seatakse **vaikimisi määratud** helitugevus ja kuulmisprogramm.

Surunupu või klahvlüliti kaudu

- ▶ Sisse- või väljalülitamine: vajutage surunuppu või klahvlüliti ja hoidke seda mitu sekundit all. Juhtnuppude sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud.
Pärast sisselülitamist säilitatakse **varem** kasutatud helitugevus ja kuulmisprogramm.

Kaugjuhtimispuldi kaudu.

- Järgige kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Pärast sisselülitamist säilitatakse **varem** kasutatud helitugevus ja kuulmisprogramm.

Kuuldeaparaate kandes võib hoiatustoon märku anda, kui aparaat sisse või välja lülitatakse.

Viivitusega käivituse aktiveerimisel lülituvad kuuldeaparaadid pärast mitmesekundilist viivitust sisse. Selle aja jooksul saate kuuldeaparaadid ilma ebameeldivat kajavat vilinat kuulmata kõrva sisestada.

Viivitusega käivituse saab aktiveerida teie kuulmisspetsialist.

Kuuldeaparaatide sisestamine ja eemaldamine

Teie kuuldeaparaadid on teie vasaku ja parema kõrva jaoks peenhäälestatud.

Värvilised märgid näitavad pooli järgmiselt:

- punane märk = parem kõrv;
- sinine märk = vasak kõrv.




Kuuldeaparaadi sisestamine.

- ▶ Hoidke vastuvõtja kaablit kuularile lähemal olevast lookest.
- ▶ Lükake kuular ettevaatlikult kõrvakanalisse ❶.
- ▶ Pöörake seda kergelt, kuni see hästi paigal püsib.

Avage ja sulgege suu, et vältida õhu kogunemist kuulmekäiku.

- ▶ Tõstke kuuldeaparaati ja libistage see kõrva peale ❷.

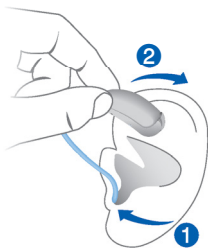

ETTEVAATUST

Vigastusoht!

- ▶ Sisestage kõrva käiv osa ettevaatlikult ja mitte liiga sügavale kõrva.

i

- Lihtsam on sisestada **parem** kuuldeaparaat **parema** käega ja **vasak** kuuldeaparaat **vasakuga**.
- Kui teil on kuulari paigaldamisega raskusi, kasutage kõrvanibu kergelt allapoole tõmbamiseks teist kätt. See avab kõrvakanali ja hõlbustab kuulari paigaldamist.


Valikuline kinnitusjuhe aitab kuularil kindlalt kõrvas püsida. Kinnitusjuhtme paigutamiseks toimige järgmiselt:

- Painutage kinnitusjuhet ja paigutage see ettevaatlikult kõrva kuulmekäigu põhja (vt pilti).



Kuuldeaparaadi eemaldamine.

- ▶ Tõstke kuuldeaparaati ja libistage see kõrva peale **1**.
- ▶ Kui teie kuuldeaparaat on varustatud kohandatud kesta või üksusega Click Mold, eemaldage see, tõmmates väikest eemaldamisjuhet kukla poole.
- ▶ Kõikide teiste kuularite puhul toimige järgmiselt: Haarake kõrvakanalis olevast kuularist kahe sõrmega ja tõmmake see ettevaatlikult välja **2**.

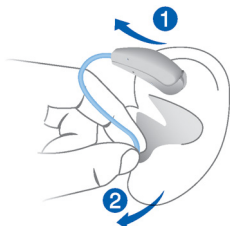

Ärge tõmmake vastuvõtja kaablit.



ETTEVAATUST

Vigastusoht!

- ▶ Väga harvadel juhtudel võib kõrva käiv osa kuuldeaparaadi eemaldamisel teie kõrva jääda. Kui nii juhtub, laske kõrva käiv osa eemaldada arstil.

Pärast kasutamist puhastage ja kuivatage kuuldeaparaate. Lisateavet vt jaotisest Hooldus.

Helitugevuse reguleerimine

Teie kuuldeaparaadid reguleerivad heli kuulmisolukorrale vastavaks automaatselt.

- Kui eelistate helitugevuse käsitsi reguleerimist, vajutage lühidalt surunuppu/klahvlülitit või kasutage kaugjuhtimispulti.

Juhtnuppude sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud.

Lisasignaal võib helitugevuse muutumist näidata.

Kui on saavutatud maksimaalne või minimaalne helitugevus, võite kuulda lisasignaali.

Kuulmisprogrammi muutmine

Teie kuuldeaparaadid reguleerivad heli kuulmisolude järgi automaatselt.

Teie kuuldeaparaatidel võib olla ka mitmeid kuulmisprogramme, mis võimaldavad vajaduse korral heli muuta. Lisasignaal võib näidata programmi muutumist.

- Kuulmisprogrammi muutmiseks vajutage surunuppu/klahvlüliti või kasutage kaugjuhtimispulti. Juhtnuppude sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud. Kuulmisprogrammide loendi nägemiseks vt jaotist Sätted.



Kui funktsioon AutoPhone või TwinPhone on aktiveeritud, lülitub kuulmisprogramm automaatselt telefoniprogrammile, kui telefoni vastuvõtja on kõrva lähedal.

Lisateavet vt jaotisest „Telefoni teel suhtlemine”.

Täiendav kohandamine (valikuline)

Teie kuuldeaparaadi juhtseadiseid saab kasutada ka näiteks heli tasakaalu või tinnituse ravisignaali taseme muutmiseks. Heli tasakaal võimaldab teil bassi ja kõrgeid toone teie eelistustele vastavaks kohandada.

Juhtnuppude sätete vaatamiseks vt jaotist „Juhtnupud”.

Erilised kuulmisolud

Fookuse seadistamine (valikuline)

Kui soovite keskenduda otsesemalt teie ees olevale vestluspartnerile või kui soovite kuulata laiemat ümbrust, annab ruumiline konfiguraator teile kontrolli oma kuulamiseelistuste üle.

Saate valida erinevaid tasemeid (alustades tasemest „Keskenduge eespool olevale” (vasakpoolne pilt), jätkates tasemetega „Keskel olev” (keskmine pilt) ja „Kuulake kogu ümbritsevat” (parempoolne pilt)).



Eeltingimused:

- peate kandma kahte kuuldeaparaati;
- Ühele teie kuuldeaparaatidest tuleb kuulmisspetsialistil paigaldada klahvlüliti ruumilise konfiguraatori jaoks.

Klahvlüliti sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud.

Sobiva nutitelefoni rakendusega on teil veelgi rohkem juhtimisvõimalusi.

Fookuse käsitsi seadistamine.

- ▶ Kui teil on mitu kuulmisprogrammi, valige kuulmisprogramm 1.
- ▶ Vajutage klahvlülitit, mis on selle funktsiooni jaoks määratud.

Vaikimisi on aktiivne keskmine tase.

- ▶ Vajutage ülemist klahvlülitit, et keskenduda rohkem ees olevale, või alumist klahvlülitit, et kuulata laiemat ümbrust.

See funktsioon on mõeldud ainulaadsete ja ajutiste kuulmisolude jaoks. Kuuldeaparaadid naasevad automaatselt programmi 1 automaatse seadistuse juurde, kui ümbritsevad helid märkimisväärselt muutuvad või umbes 45 minuti pärast. Ruumilise konfiguraatori režiimist saab ka väljuda.

Ruumilise konfiguraatori režiimist väljumine.

- ▶ Lülituge minimaalsele või maksimaalsele tasemele.

Lisasignaali võib viidata minimaalsele ja maksimaalsele tasemele.

- ▶ Lülituge üks samm edasi.

Esitatakse sama signaal, mida kuulete kuulmisprogrammi muutmise märguandena. See näitab, et olete ruumilise konfiguraatori režiimist väljunud.

Kasutamine telefoni teel suhtlemisel

Kui suhtlete telefoni teel, hoidke telefoni vastuvõtjat veidi kõrvast kõrgemal. Kuuldeaparaat ja telefoni vastuvõtja peavad olema vastakuti. Keerake vastuvõtjat veidi nii, et kõrv ei oleks täiesti kaetud.



Telefoniprogramm

Võite telefoni kasutamisel eelistada kindlat helitugevust. Paluge oma kuulmisspetsialistil telefoniprogramm konfigurereida.

- Lülitage telefoniprogrammile mis tahes ajal, kui telefoni teel suhtlete või programmi automaatset valijat kasutate.

Kui telefoniprogramm või programmi automaatne valija on teie kuuldeaparaadi jaoks konfigureeritud, on see loetletud jaotises Sätted.

Automaatne programmilüliti (AutoPhone või TwinPhone)

Teie kuuldeaparaat saab telefoniprogrammi valida **automaatselt**, kui toote telefoni kuuldeaparaadi lähedale. TwinPhone edastab isegi kõne mõlemasse kõrva. Kui olete telefoniga rääkimise lõpetanud, liigutage telefon kuuldeaparaadist kaugemale ja mikrofonirežiim rakendub uuesti.

Kui soovite seda funktsiooni kasutada, paluge oma kuulmisspetsialistil teha järgmist:

- Aktiveerige funktsioon AutoPhone võiTwinPhone.
- Kontrollige telefoni vastuvõtja magnetvälja.

Programmi automaatse valija korral tuvastab teie kuuldeaparaat telefoni vastuvõtja magnetvälja. Kõik telefonid ei tekita selle funktsiooni aktiveerimiseks piisava tugevusega magnetvälja. Sellisel juhul saate kasutada üksuse AutoPhone magnetit, mis on saadaval tarvikuna, ja kinnitada selle telefoni vastuvõtjale.

Magneti paigaldamise kohta lugege üksuse AutoPhone magneti kasutusjuhiseist.



TÄHELEPANU

Kasutage vaid heakskiidetud AutoPhone'i magnetit. Küsige seda tarvikut oma kuulmisspetsialistilt.

Heli induktsioonsilmused

Mõni telefon ja avalik koht (nt teater) pakub helisignaali (muusika ja kõne) heli induktsioonsilmuste kaudu. Selle süsteemiga saavad teie kuuldeaparaadid võtta soovitud signaali vastu ilma häiriva keskkonnamürata.

Üldjuhul on heli induktsioonsilmuseid võimalik ära tunda kindlate märkide järgi.



Paluge oma kuulmisspetsialistil telefonipooli programm konfigurereida.

- Lülitage telefonipooli programmile mis tahes ajal, kui olete heliinduktsiooni ahelaga kohas.

Kui telefonipooli programm on teie kuuldeaparaatide jaoks konfigureeritud, on see loetletud jaotises Sätted.

Telepooli programm ja kaugjuhtimine



TÄHELEPANU

Traadita ühenduvusega aparaatide korral: kui telepooli programm on aktiivne, võib kaugjuhtimispuhlt põhjustada pulseerivat müra.

- Kasutage kaugjuhtimispuhlti üle 10 cm (4 tolli) vahemaa puhul.

Hooldus

Kahjustuste vältimiseks on oluline, et hooldate oma kuuldeaparaate ja järgite mõnd põhireeglit, millest saab peagi teie igapäevane tegevus.

Kuuldeaparaadid

Kuivatamine ja hoiustamine

- ▶ Laske kuuldeaparaatidel terve öö kuivada.
- ▶ Küsige soovitatavate kuivatamistoodete kohta oma kuulmisspetsialistilt.
- ▶ Kui te kuuldeaparaate pikema aja jooksul ei kasuta, hoidke neid niiskuse halva mõju vältimiseks avatud akukambriga ja eemaldatud akudega kuivatussüsteemis.

Puhastamine

Kuuldeaparaatidel on kaitsekate. Kuid ebaregulaarse puhastamise korral võite kuuldeaparaati kahjustada või põhjustada kehalisi vigastusi.

- ▶ Puhastage kuuldeaparaati iga päev pehme kuiva lapiga.
- ▶ Ärge kasutage kunagi voolavat vett ega kastke seadet vette.
- ▶ Ärge aparaati puhastades suruge seda.
- ▶ Küsige kuulmisspetsialistilt soovitatavaid puhastusvahendeid, spetsiaalseid hoolduskomplekte või lisateavet kuuldeaparaatide heas seisukorras hoidmiseks.



Kuularid


Puhastamine

Kuularitele võib koguneda kõrvavaiku. See võib mõjutada helikvaliteeti. Puhastage kuulareid iga päev.

Kõikide kuularitega toimige järgmiselt:

- Puhastage kuularit kohe pärast eemaldamist pehme kuiva lapiga.

See hoiab ära kõrvavaigu kuivaks ja kõvaks muutumise.

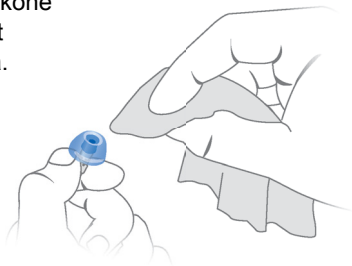

Kuulari Click Domes korral:

- Pigistage kupli otsa.




Vahetamine

Vahetage standardseid kuulareid umbes iga kolme kuu tagant. Asendage need varem, kui märkate mõrasid või muid muutusi. Standardsete kuularite vahetamise protseduur oleneb kuulari tüübist. Jaotises Osad ja nimetused on teie kuulmisspetsialist märkinud teie kuulari tüübi.

Kuularite Click Domes vahetamine

Kui teil on vanade kuularite Click Dome eemaldamisega probleeme, kasutage eemaldamistööriista või järgige kuularite Click Domes pakendil olevaid juhiseid.

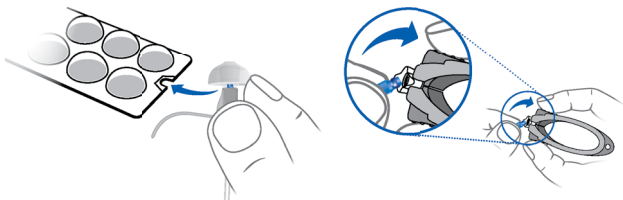

Eemaldamistööriist on saadaval tarvikuna.

- Jälgige eriti hoolikalt, et uus Click Dome märgatavalt paigale klõpsataks.



Professionaalne hooldus

Teie kuulmisspetsialist saab teha põhjaliku professionaalse puhastamise ja hoolduse.

Kohandatud kuularid ja vaigufiltrid peab vajaduse korral välja vahetama spetsialist.

Küsige kuulmisspetsialistilt isiklikke soovitusi hooldusintervallide ja toe kohta.

Lisateave

Traadita funktsionaalsus

Teie kuuldeaparaadid on varustatud traadita funktsionaalsusega. See pakub sünkroonimisvõimalust kahe kuuldeaparaadi vahel.

- Kui muudate ühe aparaadi programmi või helitugevust, muudetakse automaatselt ka teist.
- Mõlemad kuuldeaparaadid kohanevad samal ajal automaatselt kuulmisoludega.

Traadita funktsionaalsus võimaldab kaugjuhtimispuldi kasutamist.

Tarvikud

Saadaolevate tarvikute tüüp oleneb aparaadi tüübist. Näited on: kaugjuhtimispult, heli voogesitamise seade või nutitelefoni rakendus kaugjuhtimispuldile.

Mõned kuulmisaparaatide tüübid toetavad lahendusi CROS ja BiCROS ühepoolse kurtusega inimestele.

Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt.

Selles dokumendis kasutatavad sümbolid



Viitab olukorrale, mille tõttu võib tekkida tõsiseid, keskmisi või kergeid vigastusi.



Näitab võimalikku varakahju.



Nõuanded ja näpunäited seadme paremaks käsitlemiseks.

Tõrkeotsing

Probleem ja võimalikud lahendused

Helitugevus on nõrk.

- Suurendage helitugevust.
- Vahetage tühi aku välja või laadige seda (oleneb aku tüübist).
- Puhastage kuularit või vahetage see välja.

Kuuldeaparaat tekitab vilistavat heli.

- Pange kuular uuesti kõrva, kuni see on kindlalt paigas.
- Vähendage helitugevust.
- Puhastage kuularit või vahetage see välja.

Heli on moonutatud.

- Vähendage helitugevust.
 - Vahetage tühi aku välja või laadige seda (oleneb aku tüübist).
 - Puhastage kuularit või vahetage see välja.
-

Probleem ja võimalikud lahendused

Kuuldeaparaat tekitab signaaltoone.

- Vahetage tühi aku välja või laadige seda (oleneb aku tüübist).
-

Kuuldeaparaat ei tööta.

- Lülitage kuuldeaparaat sisse.
 - Pange akukamber ettevaatlikult täiesti kinni.
 - Vahetage tühi aku välja või laadige seda (oleneb aku tüübist).
 - Veenduge, et aku on õigesti sisestatud.
 - Viivitusega käivitus on aktiivne.
- Oodake mõni sekund ja proovige uuesti.
-

Muude probleemide ilmnemisel küsige nõu kuulmisspetsialistilt.

Riigipõhine teave

Hooldus ja garantii

Seerianumbrid	Seade	Vastuvõtuseade
---------------	-------	----------------

Vasak:

Parem:

Hoolduse kuupäevad

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

Garantii

Ostukuupäev:

Garantiaeg kuudes:

Teie kuulmisspetsialist



Legal ManufactSeaduslik tootjaurer

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Saksamaa

Telefon +49 91 313 080

Tootja on Signia GmbH, kaubamärgi Siemens AG litsentsi all.

Document No. 02718-99T01-8V00 ET

Order/Item No. 109 362 84

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 02.2016

